

**在肛肠科的应用**

○单纯性肛瘘术后实验组和对照组比较

愈合时间(d)

疼痛分值

(vas-4) 4级评分法：  
0: 无疼痛 1: 轻度疼痛 2: 中度疼痛 3: 重度疼痛

80例患者随机分2组，每组40例；  
实验组：藻酸盐敷料；对照组：生理盐水纱布  
四川乐山中医医院外二科曹席静

藻酸盐敷料在肛肠科主要用于肛肠囊肿，肛瘘术后，有深腔、窦道、潜行的伤口；开放性痔疮手术（外剥内扎术-Milligan-Morgan）；术后渗出伤口等。

**藻酸盐敷料在肛肠科的使用方法**

用于囊肿肛瘘伤口，需要将敷料填实创面底部，不能留有死腔，避免假性愈合。  
用于痔疮伤口，需要藻酸盐敷料覆盖整个创面包括肛周皮肤和肛管。  
伤口渗出较少时，使用前可用少量生理盐水和林格液湿润伤口。  
痔疮、囊肿、肛瘘术后创面愈合，根据病人身体状况的不同一般需要30-45天，建议开始每天换药1-2次。  
换药时间的选择：每天便后清洁创面，而后使用藻酸盐敷料，同时根据创面渗出的多少决定是否换药（一般渗出液基本浸润整个敷料或者渗出液漏出，就需要换药）。  
当肉芽组织开始形成，渗出液减少，更换医用膜的次数也相应减少。  
每片藻酸盐敷料覆盖伤口的时间最长不能超过七天。  
在特殊情况下藻酸盐敷料可以纱布，绷带，透明贴等固定。

**作用机理**

**安全无毒性** 天然高分子材料，对人体无任何毒性，可安全使用。

**高吸湿性** 藻酸盐敷料可吸收相当于自身重量的10~20倍液体，为纱布的5~7倍。

**止血性** 藻酸盐敷料接触性伤口渗液释放Ca<sup>2+</sup>，能促进凝血酶原激活物的形成，加速血凝过程。

**成胶性** 吸收伤口渗出液，与渗液发生Na<sup>+</sup>/Ca<sup>2+</sup>离子交换，在创口表面形成一层稳定的网状凝胶。为伤口营造一个利于组织生长的微环境（微酸、无氧或低氧、适度湿润）。

**促进伤口愈合** 微酸、无氧或低氧、适度湿润的伤口环境促进生长因子释放，刺激细胞增殖，提高表皮细胞的再生能力和细胞移动，促进伤口愈合。

**抑菌性** 1.密封性好，使伤口与外界细菌隔绝；  
2.有害细菌被固定在纤维内部，有效抑制了有害细菌繁殖且减少细菌与创面接触的机会；  
3.湿润、微酸的环境有利于中性粒细胞发挥作用，增强局部杀菌能力，降低感染发生率。

**减少局部疼痛** 表面形成的水凝胶体有效保护神经末梢，避免外界刺激；不易与伤口粘连，易移除，减少伤口疼痛。

**减少疤痕形成** 由于对创面无刺激，无损伤，所以疤痕形成少。

**适应症**

1.处理渗液和局部止血  
2.有中-重度渗出物以及有腔隙的伤口  
3.压疮和褥疮  
4.糖尿病足溃疡  
5.下肢静脉和动脉溃疡  
6.移植供皮区及外伤等各种难治性伤口

**使用方法**

1.使用前先按常规步骤清洁伤口。  
2.选择略大于伤口面积的藻酸盐敷料，撕开内包装，小心取出敷料，将藻酸盐敷料贴敷在伤口部位，轻轻挤压使之紧密接触，确保覆盖整个表面；如果伤口很深或者有窦道，最好使用条形藻酸盐敷料。  
3.选用适当的固定敷料覆盖。伤口渗出液可能从胶体表面蒸发，如果渗出很多，使用第二层敷料的时候以不妨碍蒸发过程为准。  
4.如果伤口渗出液很多，敷料需要每天更换一次，在愈合过程中可以每周更换两次（或一次）。  
5.去除藻酸盐敷料时，用镊子将敷料轻柔提起即可去除，如果用于渗出液非常少的伤口，敷料可能会发生粘附，可以用生理盐水冲洗伤口，再用镊子将敷料轻柔提起即可去除。

**注意事项**

- 受到感染的伤口使用本品需要在医务人员指导下使用，并配合其他治疗措施，医护人员需要经常评估病人临床指征，检查伤口情况。不适用于三度烧伤。
- 藻酸盐敷料不适用大量，持续出血的情况。
- 万一出现过敏反应，请立即停止使用并请立即与本公司联系。
- 对于干性创面，不建议使用本敷料。

**产品规格**

规格	包装
5cm × 5cm	10片/盒
10cm × 10cm	10片/盒
2g × 30cm	10片/盒

**藻愈 Zhou Yu®**  
藻酸盐敷料 ALGINATE  
10片装 (10cm × 10cm)  
杭州吉为医疗科技有限公司 HANGZHOU JIWEI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

**加快伤口愈合  
减少更换次数**

**杭州吉为医疗科技有限公司**  
HANGZHOU JIWEI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

生产许可证号：浙食药监械生产许20130071号  
注册证编号：浙械注准20152640018  
注册产品标准编号：YZB/浙4296-2014《藻酸盐敷料注册标准》  
生产企业：杭州吉为医疗科技有限公司  
地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2636号1幢3层312室  
联系方式：Tel: 0571-89187013 Fax: 0571-89187015  
网站：www.jiweiyliao.com  
邮编：311100

**STERILE R**

**杭州吉为医疗科技有限公司**  
HANGZHOU JIWEI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.