

285*210mm

- 缓解口腔溃疡
- 缓解口腔炎症
- 缓解牙箍或假牙造成的微小创口所带来的疼痛

规格 SPECIFICATIONS

60ML 120ML 240ML 360ML 480ML 1000ML

吉爽®
口腔溃疡含漱液
GARGLE ORAL ULCER

吉为医疗
JIWEI MEDICAL

杭州吉为医疗科技有限公司
HANGZHOU JIWEI MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

生产许可证号：浙食药监械生产许20130071号
注册证编号/产品技术要求编号：浙械注准20182630015
生产企业：杭州吉为医疗科技有限公司
生产地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2639号1幢3层312室
联系方式：Tel: 0571-89187013 Fax: 0571-89187015
售后服务单位：杭州吉为医疗科技有限公司
联系方式：Tel: 0571-89187013 Fax: 0571-89187015
邮编：311100



吉爽®
口腔溃疡含漱液
GARGLE ORAL ULCER

结构组成 | STRUCTURE COMPOSITION

本品由纯化水、磷酸氢二钠、糖精钠、卡波姆均聚物A、甘油、柠檬酸、吐温60、氢氧化钾、苯甲醇、甜橙香精制成的溶液和口服液体药品聚脂瓶组成。

适用范围

通过在患处表面形成保护膜，物理遮蔽创口，缓解因口腔溃疡、口腔炎症、牙箍或假牙造成的微小创口所带来的疼痛。

用法用量

缓慢将5ml含漱液倒入口腔中，含漱时至少在口腔中停留1分钟。如果含漱不便或疼痛明显时，可轻轻转动头部将含漱液涂布于整个口腔并确保充分覆盖，必要时可加量至10ml。含漱后吐出液体，治疗口腔黏膜炎/口腔溃疡，建议每日使用4-6次或参照医嘱。

注意事项

- 禁忌症** 对本品所含成分过敏者禁用。
- 适用人群** 本品适用于患有口腔溃疡、牙箍或假牙造成的微小创口和口腔溃疡（复发性口腔溃疡或手术、假牙、正畸等引起创伤性溃疡）的患者。
- 贮存** 常温贮存。温度：10-30℃；湿度：≤75%；包装用的聚脂瓶已是棕色，无需再避光保存。

杭州吉为医疗科技有限公司 HANGZHOU JIWEI MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.